


Blutkulturentnahme Schritt für Schritt





Markieren Sie das empfohlene Füllvolumen auf der Skala des Flaschenetikettes.

Entfernen Sie den Plastikdeckel und desinfizieren Sie das Septum der Flasche mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (Einwirkzeit beachten und trocknen lassen!).¹

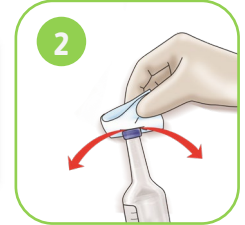


Desinfizieren Sie die Punktionsstelle mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und beachten Sie die Einwirkzeit. Bei 70 % Isopropylalkohol mindestens 60 Sekunden einwirken und trocknen lassen. Punktionsstelle nicht mehr berühren!

Die Flügelkanüle (BD Vacutainer® Safety-Lok™ Blutentnahmeset) mit Daumen und Zeigefinger an den Flügeln festhalten und die Vene punktieren.

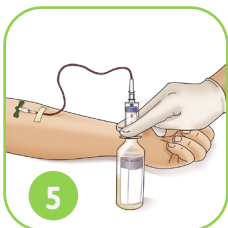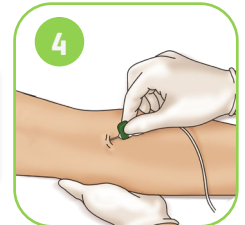

Blutkulturen zuerst beimpfen. Dafür den BD Vacutainer® Halter auf die Flasche setzen, herunter drücken und festhalten. Blutkulturflaschen dabei aufrecht stellen. Erst die aerobe, dann die anaerobe Flasche befüllen. Die Blutkulturflaschen bis zur Markierung mit dem empfohlenen Blutvolumen befüllen, bevor sie aus dem Halter gezogen werden. Blutkulturflaschen nach dem Beimpfen kurz schwenken, um eine Durchmischung von Blut und Medium zu gewährleisten.¹

Legen Sie einen Tupfer locker auf die Punktionsstelle. Halten Sie das gelbe Schutzschild am Ende zwischen Daumen und Zeigefinger, während die restlichen Finger den Schlauch zur Fixierung gegen die Handinnenfläche drücken. Halten Sie den Schlauch straff und schieben Sie den Schutzschild mit Daumen und Zeigefinger nach vorne, bis ein "Klicken" zu hören ist.

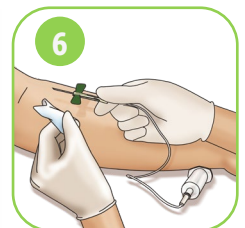

Verwerfen Sie die verwendeten Materialien in einen geeigneten Abfallbehälter in Reichweite. Versorgen Sie die Punktionsstelle nach den Vorschriften Ihres Hauses. Desinfizieren Sie Ihre Hände nach den Richtlinien Ihres Hauses.¹

Flaschen sollten schnellstmöglich im Instrument inkubiert werden (2 bis 4 Stunden sollten nicht überschritten werden).¹

